

ЯК ЗАСТОСОСУВАТИ СИТО TEST COVID-19?

Крок 1. Перед проведенням тестування ретельно вимийте руки теплою водою з милом. Дістаньте тест-касету з упаковки, розмістіть її на горизонтальній поверхні.



Крок 2. Промасажуйте руку в напрямку кінчика пальця, обробіть спиртовою серветкою подушечку середнього чи безіменного пальця. Зачекайте доки шкіра висохне.



Крок 3. Зніміть запобіжний ковпачок з ланцета і притисніть до подушечки пальця. Натисніть на виступ на ланцеті , і він сам зробить прокол так ,що ви навіть не відчуєте. Промасуйте палець, доки не виступить крапелька крові . Витріть першу краплину крові спиртовою серветкою.




Крок 4. За допомогою одноразової піпетки проведіть забір крові до відповідної відмітки



Крок 5. Внесіть зразок в лунку (S) тест-касети, додайте туди 2 краплі буфера



Крок 6. Облік результатів ПРОВЕСТИ ЧЕРЕЗ 10 ХВИЛИН, але не брати до уваги результат через 20 ХВИЛИН

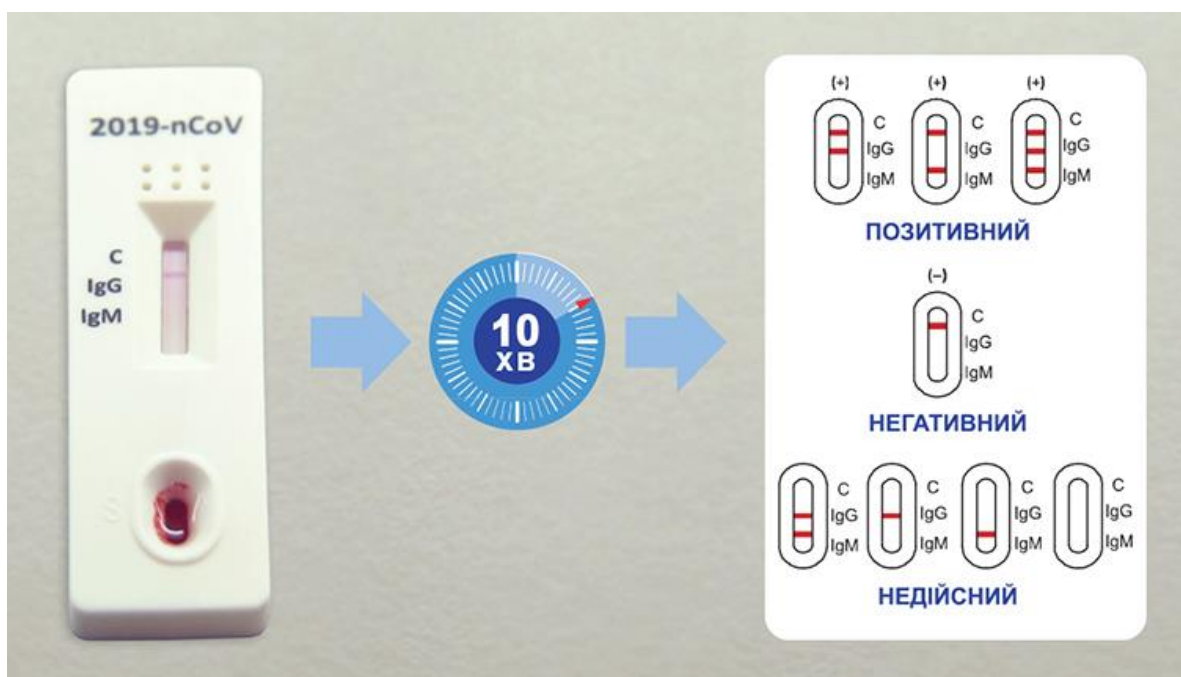

Негативний результат не виключає наявності інфекції COVID-19 і не повинен використовуватися в якості єдиного критерію для постановки діагнозу. Стратегія ведення пацієнтів визначається при комплексній оцінці епідеміологічного анамнезу, клінічних даних, результатів інших лабораторних та інструментальних досліджень. Тест-набір призначений для професійного використання. Купуючи тест, зверніться до сімейного лікаря або медичного працівника.